

Consignes d'échantillonnage à faire

Capitainer qDBS
CE IVD

Veillez lire l'ensemble de ces consignes avant de commencer !

Nous vous recommandons également de voir notre vidéo de démonstration avant de commencer l'échantillonnage. Scannez le code QR en pointant l'appareil photo de votre téléphone (ou l'appareil photo de votre tablette ou votre ordinateur) sur le code QR ou consultez capitainer.se/how-to-use/ et visionnez la vidéo.



(a) Carte d'échantillonnage
Capitainer qDBS



(b) Lancette
jetable



(c) Tampon imbibé
d'alcool



(d) Comresse



(e) Pansement




(f) Étui de retour

Placez tout le matériel dans l'ordre dans lequel il doit être utilisé cf. ci-dessus.


Prenez également votre identification pour la référence de l'échantillon et l'enveloppe de retour.




Lavez-vous les mains avec du savon et de l'eau chaude. Une main propre et chaude est déterminante pour l'échantillonnage

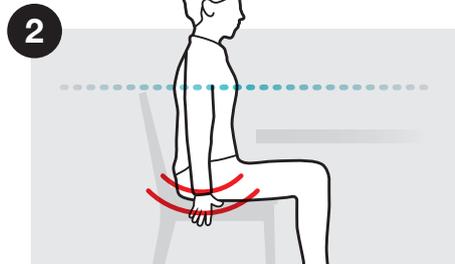


Asseyez-vous et laissez vos mains pendre à vos côtés. Secouez-les pour accélérer la circulation sanguine. Gardez toujours vos mains en dessous du cœur.

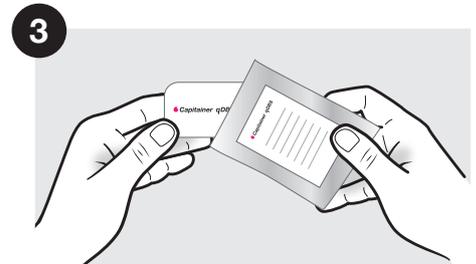


Ouvrez et retirez la carte d'échantillonnage (a). Jetez l'emballage extérieur

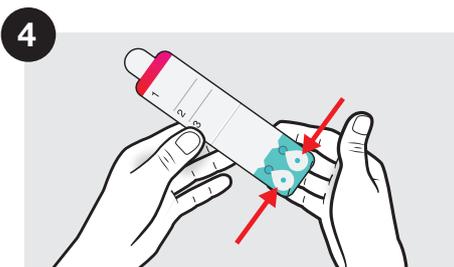


Ouvrez la carte et posez-la sur la table. Ne touchez pas aux puits d'échantillonnage sur la carte.

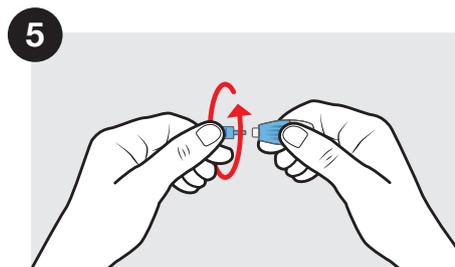


Tournez l'embout protecteur de la lancette et retirez-le. N'appuyez pas encore pour faire sortir l'aiguille.

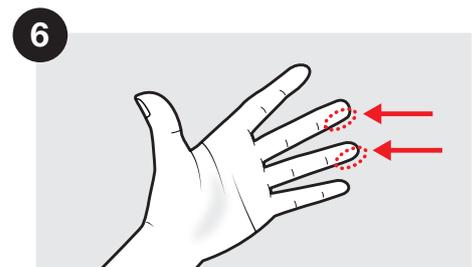


Choisissez un doigt dans lequel piquer, le majeur ou l'annulaire.

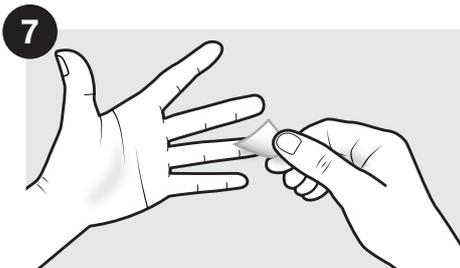


7 Désinfectez ensuite en utilisant le tampon imbibé d'alcool. (c).

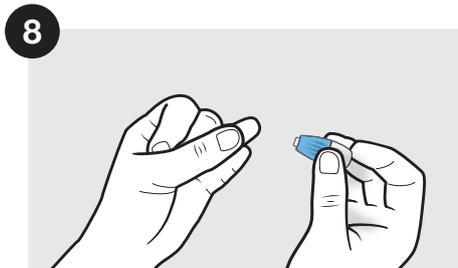


8 Laissez le doigt sécher à l'air pendant quelques secondes. Appuyez doucement avec le pouce pour que le bout du doigt soit rempli de sang.

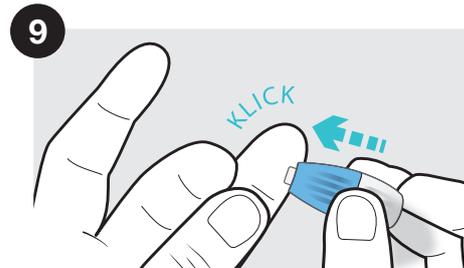


9 Piquez sur le côté du bout du doigt en exerçant une certaine pression avec la lancette.

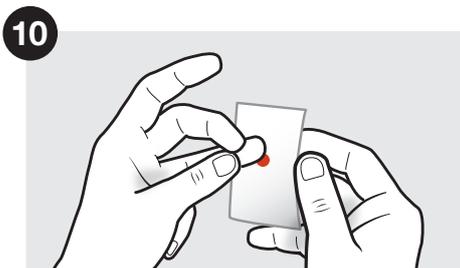


10 Relâchez la pression sur le bout du doigt et attendez quelques secondes jusqu'à ce que le sang en sorte. Essuyez la première goutte avec la compresse (d).

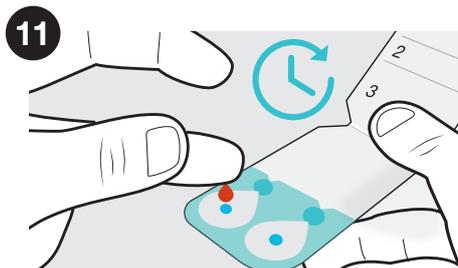


11 Laissez votre main pendre librement jusqu'à ce qu'une autre goutte de sang se forme. Attendez que la goutte tombe presque sous son propre poids et appliquez la goutte dans l'un des puits d'échantillons

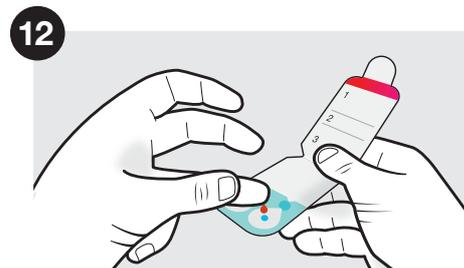

12 Attendez qu'une nouvelle grande goutte de sang se forme, puis appliquez la goutte dans le second puits d'échantillons

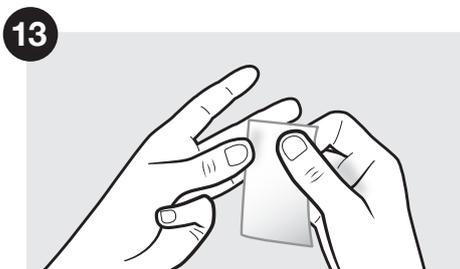

13 Arrêtez le saignement avec la compresse (d). Appliquez le pansement (e).

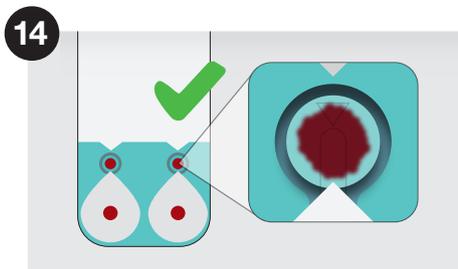

14 Vérifiez l'échantillonnage.
Réussi : le remplissage de sang de la fenêtre de contrôle apparaît comme sur l'image, et de préférence identiquement dans les deux fenêtres.



15 Après l'échantillonnage, fermez la carte d'échantillonnage et étiquetez-la selon les instructions du laboratoire. Glissez la carte d'échantillon dans l'étui de retour (f), Et envoyez-la par courrier dans l'enveloppe préaffranchie*

* Tout matériel d'échantillonnage restant/usagé peut être jeté avec les ordures ménagères



Capitainer AB, Norr Mälarstrand 54, 112 20 Stockholm, SWEDEN
info@capitainer.se
www.capitainer.se

COPYRIGHT © 2020 CAPITAINER AB. ALL RIGHTS

MM20-017-01