

Istruzioni per l'autocampionamento

 **Capitainer qDBS**

CE IVD

Leggere tutte le istruzioni prima di iniziare!

Si consiglia inoltre di guardare il nostro video dimostrativo prima di iniziare il campionamento. Scansionare il codice QR puntando la fotocamera del cellulare (o la fotocamera del tablet o del computer) sul codice QR o andare su capitainer.se/how-to-use/ per vedere il video.



(a) Scheda di campionamento qDBS Capitainer



(b) Lancetta monouso



(c) Tampone imbevuto di alcol



(d) Compresa da medicazione



(e) Cerotti



(f) Custodia di reso

Disporre tutti i materiali nell'ordine in cui saranno utilizzati.


Acquisire anche il proprio ID campione/la propria consultazione e busta di riconsegna

1



Lavarsi le mani con acqua calda e sapone. Una mano pulita e calda è essenziale per un facile campionamento.

2

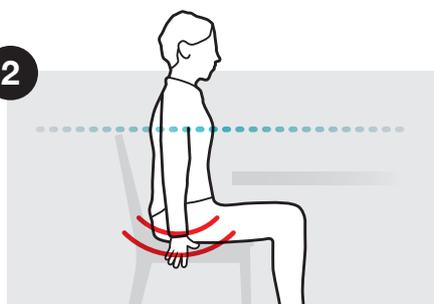

Sedersi e lasciare che le mani penzolino lungo i fianchi. Scuoterle per aumentare la circolazione sanguigna.


Tenere sempre le mani al di sotto dell'altezza del cuore.

3




Aprire ed estrarre la scheda di campionamento (a). Gettare la confezione esterna.

4

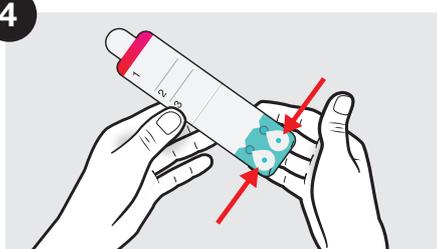


Aprire la scheda e posizionarla sul tavolo. Non toccare i pozzetti dei campioni della scheda.

5

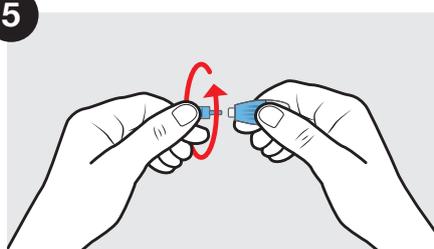


Preparare la lancetta (b) rimuovendo la parte superiore della lancetta con una rotazione, senza spingere l'ago in avanti.


6

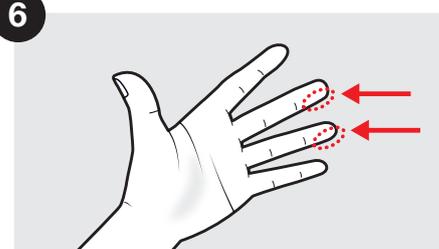


Scegliere un dito da pungere: il medio o l'anulare.

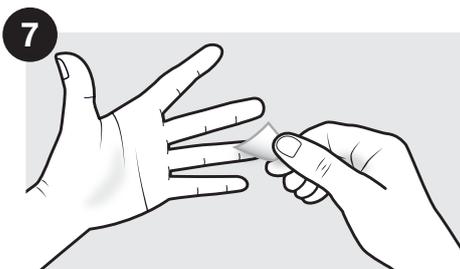


7
Quindi, disinfettare lavando con il tampone imbevuto di alcool (c)

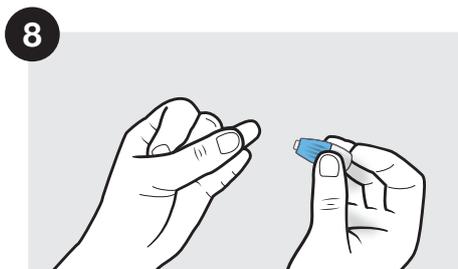


8
Lasciare asciugare il dito all'aria per alcuni secondi. Premere delicatamente con il pollice affinché il polpastrello si riempia di sangue.

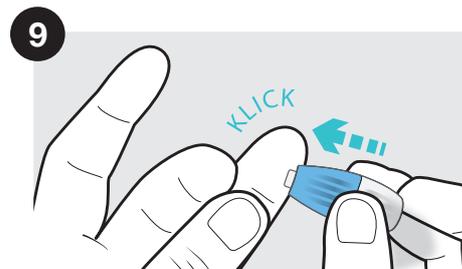


9
Pungere il lato del polpastrello esercitando una certa pressione con la lancetta.

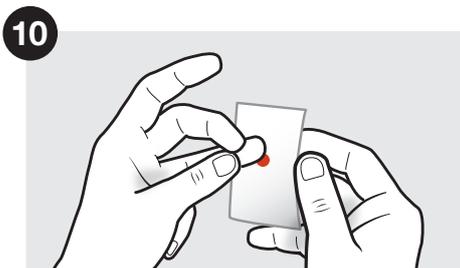


10
Non esercitare più pressione sul polpastrello e attendere alcuni secondi fino a che non appare il sangue. Asciugare la prima goccia con la compressa (d).

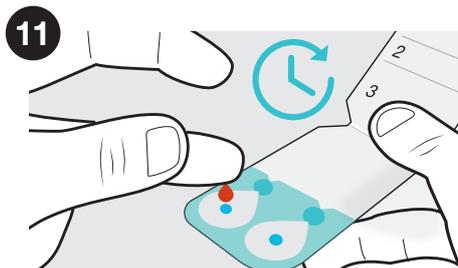


11
Lasciare penzolare la mano liberamente finché non si forma una nuova goccia di sangue. **Attendere** fino a quando la goccia non cade quasi per effetto del proprio peso e applicarla in uno dei pozzetti del campione.

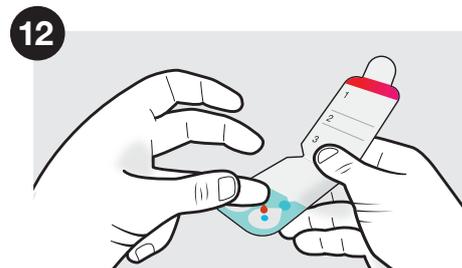

12
Attendere fino a quando non si forma una nuova grande goccia di sangue, quindi applicarla al secondo pozzetto del campione.

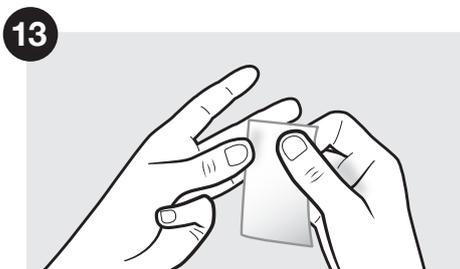

13
Fermare il sanguinamento con la compressa (d). Mettere un cerotto (e).

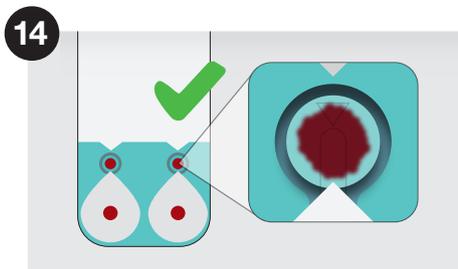

14
Controllare il campionamento. Riuscito: la finestra di controllo è stata riempita di sangue come mostrato nella figura, preferibilmente in entrambe le finestre di controllo.



15
Dopo il campionamento, chiudere la scheda di campionamento ed etichettarla secondo le istruzioni del laboratorio. Inserire la scheda di campionamento nella busta di riconsegna (f), chiuderla e inviarla per posta nella busta preaffrancata.*

* Il materiale di campionamento residuo/usato può essere smaltito con i rifiuti domestici



Capitainer

Capitainer AB, Norr Mälarstrand 54, 112 20 Stockholm, SWEDEN
info@capitainer.se
www.capitainer.se

COPYRIGHT © 2020 CAPITAINER AB. ALL RIGHTS

MM20-021-01